



CUBE

MADE IN ITALY



LIGHT UP + RF 3D

TUTTO IL POTERE RIDENSIFICANTE
DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO ISOPOLARE



WWW.CUBEPROJECT.IT

LE PERFORMANCE

Light Up + RF 3D è un'assoluta innovazione nel settore per il trattamento del **viso** e del **corpo**, con risultati visibili e progressi crescenti.

Light Up + RF 3D sfrutta una **radiofrequenza isopolare**: l'effetto 3D permette di trattare **rughe** ed **inestetismi** nella loro tridimensionalità, consentendo un trattamento davvero efficace.

Rughe ed inestetismi, infatti, non vengono trattati in modo bidimensionale, ma reintrodotti nell'architettura cutanea insieme al derma che li circonda.


La radiofrequenza standard funziona attraverso l'emissione di onde radio, con conseguente formazione di un campo elettromagnetico, costituito da almeno due poli, uno positivo e uno negativo. Queste onde sono in grado di **attraversare i diversi strati cutanei, tramite irradiazione, dall'epidermide all'ipoderma.**

La radiofrequenza isopolare trae un'ulteriore punto di forza dall'inclusione dei tessuti stessi nel processo di oscillazione del campo elettromagnetico e li integra nella produzione di energia diatermica. Nel derma si viene quindi a creare uno **shock termico** che stimola i fibroblasti nella sintesi di nuovo collagene.

Tramite un **manipolo** corpo e un manipolo viso realizzati in titanio medico, **Light Up + RF 3D** distribuisce le **onde radio** in modalità isopolare, a una frequenza di oscillazione di circa **1,5 Mhz**, che permette di realizzare un trattamento piacevole e di lavorare efficacemente **fino all'ipoderma.**



LIVELLI DI AZIONE

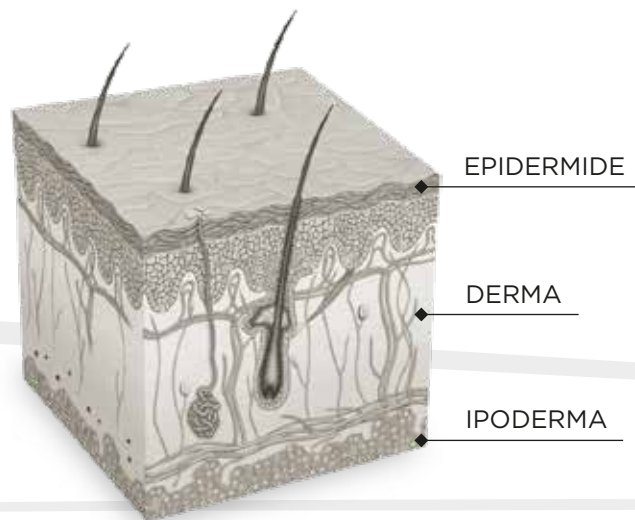

I VANTAGGI

- CONTRAE IL COLLAGENE CON EFFETTO LIFTING
- DRENA GRAZIE ALLA VASCOLARIZZAZIONE
- TONIFICA I TESSUTI E RIMODELLA L'OVALE DEL VISO

- MIGLIORA OSSIGENAZIONE E METABOLISMO CELLULARE
- RIPIERTA INDIETRO L'OROLOGIO BIOLOGICO CUTANEO

COME FUNZIONA

La **diatermia** controllata apporta calore omogeneo negli strati cutanei profondi, attraverso il campo elettromagnetico isopolare. Ne consegue un aumento della temperatura del derma fino a 41° C, che realizza un totale **recupero** del volume del **collagene** nella sua **tridimensionalità** e un aumento sensibile nella produzione di **acido ialuronico**, con conseguente riarmonizzazione delle forme di viso e corpo, senza denaturare né danneggiare le fibre e le cellule interessate.

Inoltre, i manipoli sono dotati di **luce led rossa** per la resa di un'efficace **fotobiostimolazione**, che inverte il processo ossidativo dei radicali liberi.



I PLUS

+ RIDENSIFICA

L'energia diatermica isopolare attiva la sintesi di nuovo collagene nativo e un aumento della produzione dell'acido ialuronico

+ TONIFICA

Grazie all'azione altamente specifica della luce led rossa, stimola la produzione mitocondriale di ATP, ovvero energia cellulare

+RIMODELLA

Richiama il microcircolo e permette una dissociazione dei legami fibrosi tra gli adipociti, rendendo più facile la riattivazione metabolica

SCHEDA TECNICA

POTENZA MASSIMA ASSORBITA

In conformità ai valori massimi del DM 206 del 15-10.2015

TENSIONE ALIMENTAZIONE

220 V ca

MAX POTENZA ASSORBITA

25 Watt

N° USCITE 2

MATERIALE MANIPOLI

Titanio medicale

DIMENSIONI

30X30X30 cm ca

PESO

5 Kg ca

Dispositivo FULL **MADE IN ITALY**
conforme al DM 206 del 15-10-2015

Le tecnologie CUBE suggeriscono
l'utilizzo dei cosmetici

onavì

WWW.CUBEPROJECT.IT

DISTRIBUITO DA

etik
BEAUTY FACTORY

VIA VALPRATO 68, 10155 TORINO
INFO 011.192.14.200